

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Berceau de pédiatrie Béb'x Réf. EIM107



Instructions générales	2
Déballage, stockage	2
Conseils de sécurité	3
Recommandations	3
Responsabilité du fabricant	4
Obligation de l'utilisateur	4

Introduction

Mise en place du matériel	5
Mise en place du patient	6
Conseil d'entretien et de désinfection	7
Maintenance et service	7

Fonctionnement

Compatibilité	7
Caractéristiques	8

Caractéristiques

Garantie	8
Coordonnées du fabricant	9

Garantie

* Les indications qui suivent vous sont données pour une bonne utilisation du matériel, nous vous prions de les lire attentivement.

Instructions générales

Système conçu afin de positionner un bébé dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Spécialement étudié pour que le praticien soit dans les meilleures conditions de travail lors des examens d'imagerie médicale sur un bébé ou un petit enfant.

Ce berceau de pédiatrie doit être uniquement utilisé pour des examens à la vertical, posé sur une table dédiée à l'imagerie médicale.

Déballage, stockage

Vous venez de recevoir votre berceau de pédiatrie.

Avant tout veuillez :

- à ce que le carton soit en bon état.
- si le carton est abîmé ou vous paraît suspect, vous devez le signaler au transporteur et notifier sur le bon de livraison l'étendue des dégâts.

Au déballage veuillez :

- à ce que le matériel soit dans un état impeccable, sans coups ni rayures.
- à ce que toutes les fonctionnalités soient en état de marche.
- en cas de problème, vous devez le signaler au transporteur et notifier sur le bon de livraison l'étendue des dégâts.

ATTENTION : Toutes inscriptions sur le bon de livraison «*sous réserve de vérification*» n'a aucune valeur juridique.

Seul un constat écrit lors de la réception du matériel a valeur.

Lors du stockage magasin ou entrepot, le matériel doit toujours rester dans son carton d'origine, à l'abri de la pluie et des intempéries. Lorsque le matériel n'est plus utilisé, le stocker dans un endroit à l'abri du passage et des mouvements des machines se trouvant dans la salle.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Conseils de sécurité

Veillez respecter les indications suivantes :

Lire les instructions qui suivent avant d'utiliser le berceau de pédiatrie.
Chaque détail est une précaution de sécurité qu'il convient de respecter.



DANGER : un usage inapproprié entraînerait un risque de blessure grave.



ATTENTION : un usage inapproprié entraînerait un risque pour le matériel.



DANGER : ne pas perdre des yeux le bébé.



DANGER : risque de collision avec le matériel environnant.



DANGER : Pour toute question ayant un rapport avec le rayon X (Dose, protection corporelle, etc...) se référer au PCR (personne compétente en radiologie) de votre établissement.



POIDS : maximum en charge 10 Kg

Avant toute utilisation du matériel, s'assurer :



- du parfait état de fonctionnement.



- que les sangles, et autres éléments de sécurités soient bien en place..



- que l'état de santé du bébé soit suffisant pour rester sur le berceau sans aide.



- que le bébé ne soit pas sujet aux régurgitations.



- ne jamais laisser un bébé sans être sanglé.



- que le bébé ne soit pas sanglé trop fort.

Recommandations



- Ne pas désassembler, réparer ou modifier le matériel.



- Ne pas utiliser un matériel montrant un dysfonctionnement.

Dysfonctionnement possible :

- Plateau cassé.
- Pion d'encrage manquant.
- Pions d'indexation du plateau cassé ou manquant.
- Pieds latéraux cassés.
- Sangles déchirées ou abîmée.
- matelas crevé.

Responsabilité du fabricant

La société **NEWMEDI** se décharge de toute responsabilité en cas de non respect des consignes de sécurité, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage.

La responsabilité repose uniquement sur le médecin responsable de l'examen, nous vous rappelons que tout usage de ce berceau de pédiatrie doit être fait par du personnel qualifié.

Voir page 10 «Garantie».

Obligations de l'utilisateur


L'utilisateur est tenu de s'assurer que le berceau est employé exclusivement aux fins auxquelles il est destiné, à savoir un examen de radiographie, de mettre tout en oeuvre pour le bon déroulement de cet examen et que toutes les conditions de sécurité soient respectées conformément aux instructions du présent manuel.

De toujours laisser ce manuel à la portée de l'utilisateur.

Mise en place du matériel

Avant tout, lire le manuel dans sa totalité.

- 1- Plateau.
- 2- Pions.
- 3- Matelas gonflable.
- 4- Matelas mousse.
- 5- Bandes de contention.
- 6- Sécurité plateau.
- 7- Pieds.
- 8- Disques d'orientations.
- 9- Pompe de gonflage manuelle (en option).

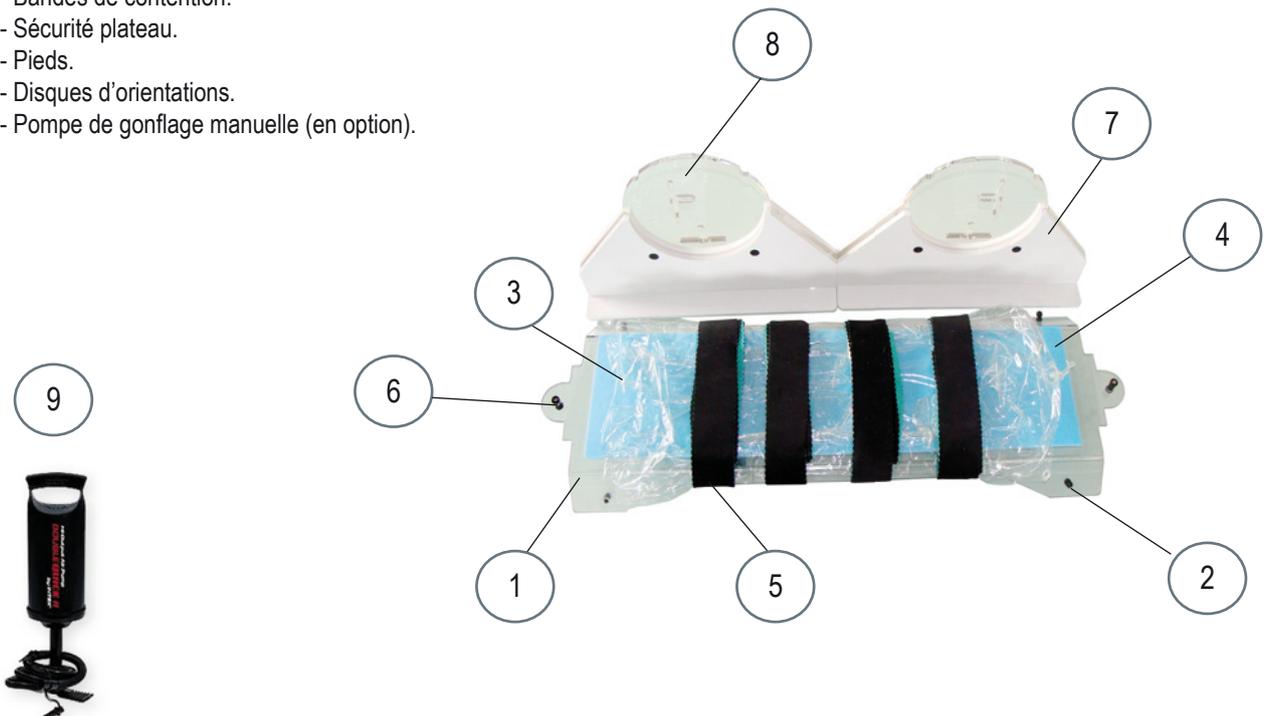

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Mise en place du matériel

Visionnez les vidéos sur le site www.newmedi.fr

Positionner les disques (8) sur les pieds (7), pour un examen à plat voir la fig. 1. Pour un examen avec des inclinaisons, voir la fig. 2.



Fig. 1



Fig. 2

Rentrer les extrémités du plateau dans les disques, puis enfoncer les sécurités (6) vers le bas fig. 3 et 4.

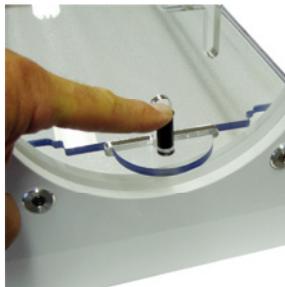


Fig. 3



Fig. 4

Gonfler le matelas, mais pas trop, de façon à ce que lors du serrage avec les bandes de contention, le matelas enveloppe bien l'enfant. Pour le gonflage, avec la bouche, ou avec une pompe manuelle ou électrique, gonflage à 0,1 bar. Nous préconisons la pompe manuelle (9) en option.

Positionner le matelas mousse (4) sur le plateau (1), puis poser le matelas gonflé (3) par dessus et l'accrocher sur les pions (2) fig. 5.



Fig. 5

Mise en place de l'enfant

Installer le bébé dans le matelas.

Commencer par sangler la tête, puis le corps.

ASTUCE : pour que les bandes s'agrippent, elles doivent être superposées sur un arrondi (fig.6) d'au moins 20 cm, **pour tous les examens en inclinaison ou à la vertical, faite deux tours autour de l'enfant.**

Les poignets peuvent être sangles avec les bandes, pour les tout petits, couper une bande en deux dans le sens de la longueur. Pour sangler les poignets, allez sur notre site internet et visualisez les vidéos nommées «Magic Strip».

Pour le reste, utiliser vos procédures habituelles.



Fig. 6

Recommandations importantes :

Ces produits doivent être mis en place par du personnel qualifié, sous la responsabilité du médecin.

Il est préférable de toujours mettre un linge entre l'enfant et le matelas.

Nous recommandons de surveiller sans relâche l'enfant tout au long de l'examen.

Afin d'assurer un maximum de sécurité et d'efficacité, il est indispensable d'ajuster au mieux la tension de serrage des bandes de contentions et des menottes.

L'enfant doit être sangle par au moins 4 sangles.



0°



45°



90°



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Conseils d'entretien et de désinfection

Eviter tout produit oxydant à base de dérivés chlorés (eau de javel) et les dérivés oxygénés (acide paracéthique).
Eviter l'accumulation de solution de nettoyage entre deux pièces.

La fréquence des nettoyages ainsi que le choix du produit dépendent uniquement du projet et des instructions de l'utilisateur.

Nous vous conseillons un nettoyage sous le robinet, puis avec une solution en spray suivi d'un essuyage avec une lingette désinfectante de marque «BACOBAN», nous consulter.

Cette marque étant la seule à avoir un produit de désinfection à base d'eau et non d'alcool.

Tout nettoyage sera essuyé avec soins.

Les bandes peuvent être nettoyées à la machine 30° maxi.

Maintenance et service

Afin d'assurer une efficacité permanente, nous vous conseillons une inspection régulière.

- Inspection journalière visuelle du matelas et des bandes de contention.

Notre service technique est en permanence à votre disposition pour vous fournir tous renseignements complémentaires.
Contact en fin du manuel.

En cas de d'usure ou de casse nous vous conseillons de les remplacer par des pièces d'origines.

Liste des pièces pouvant être changées :

FIM115 : lot de 5 matelas.

FMS276 : lot de 4 bandes.

FMS278 : Rouleau de 20 mètres «bande de contention».

FMS298 : paire de menottes.

FMS301 : pompe de gonflage manuelle.

En cas de commande de pièces détachées, vous adresser au fournisseur chez lequel à été acheté le matériel.

Compatibilité

Ce berceau de contention est compatible avec tous les services d'imagerie médicale, pour des examens uniquement à l'horizontal.

*Sous réserve d'un environnement propice à l'utilisation ou d'une machine non testée par notre service.
Pour plus de renseignement, contacter votre distributeur.*

Caractéristiques

Plateau:

- Matière Polycarbonate et PMMA.

Poids :

- A vide 6 Kg
- Poids maximum autorisé 10 Kg

Stockage :

- Volume 80 x 32 cm x H = 30 cm
- Température +5° C à +40° C
- Humidité 10% à 90%

Identification :

- Classification CE 93/42/CEE Classe I
- Type d'installation Equipement mobile

Garantie

Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à dater de la mise en circulation sur le site d'imagerie médicale.

Dans le cadre de cette garantie, les obligations de le fabricant se limitent à la réparation ou au remplacement du produit ou des pièces détachées qui se révéleraient défectueuses, sous réserve que le produit ait été correctement installé et utilisé conformément au MANUEL UTILISATEUR. Le fabricant se réserve le droit de procéder à une inspection, si cela s'avérait nécessaire, pour établir la cause du défaut. La garantie concerne le remplacement des pièces et la main d'oeuvre correspondante, qui ne seront pas facturés.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dommages ou pertes résultant d'une catastrophe naturelle telle qu'incendie, tremblement de terre, inondations, foudre, orage, etc...
- Dommages et pertes résultant d'un usage déraisonnable ou erroné, d'un abus, d'une négligence ou d'un entretien inadéquat du matériel.
- Dommages et pertes résultant d'une réparation défectueuse, d'une modification du matériel par une personne extérieure à du fabricant.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits peuvent s'y ajouter dans votre pays.

Pour bénéficier du service lié à cette garantie, vous devez nous faire parvenir un courrier recommandé décrivant le problème rencontré, ou contacter votre fournisseur.

En aucun cas vous ne pouvez renvoyer le matériel sans l'accord express de la société NEWMEDI.

A la réception de votre plainte, le fabricant pourra choisir, soit de faire réparer le matériel sur site, soit d'organiser un retour atelier.

Cette Garantie n'est pas transférable, elle n'est valable que sur le site d'origine et à une seule adresse.

Cette garantie écrite est la seule émise par le fabricant. La réparation ou le remplacement fourni par cette garantie sont les seuls remèdes proposés aux acheteurs. le fabricant ne pourra être tenu responsable d'une perte d'usage du matériel.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Distribué par :

«Toutes les illustrations et photographies présentent dans ce formulaire sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et de ce fait, ne sont pas contractuelles.»

* Prenez soins de noter ces informations :

Date d'achat :	Nom du fournisseur :	N° de série :