

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Brancard amagnétique à hauteur variable hydraulique



Instructions générales	2
Déballage, stockage	2
Conseils de sécurité	2
Recommandations.....	3
Abréviations et symboles	4
Responsabilité du fabricant	4
Obligation de l'utilisateur	4

Introduction

Utilisation du matériel	4
Conseil d'entretien et de désinfection	8
Maintenance et service	9

Fonctionnement

Compatibilité	8
Caractéristiques	9

Caractéristiques

Garantie	10
Coordonnées du fabricant	11

Garantie

Nous vous remercions pour votre achat et vous prions de lire attentivement les indications qui suivent pour une bonne utilisation du matériel.

Instructions générales

Chariot brancard amagnétique permettant le transfert des patients dans les service d'IRM. Son système de réglage en hauteur par pédale hydraulique permet d'améliorer l'ergonomie de travail de l'utilisateur et le confort du patient. La fabrication spécifique de ce produit permet sa compatibilité en milieu IRM jusqu'à 3 Tesla.

Déballage, stockage

Vous venez d'acquérir un chariot brancard amagnétique.

Avant le déballage vérifier :

- à ce que le carton soit en bon état.
- si le carton est abîmé ou vous paraît suspect, vous devez le signaler au transporteur et notifier sur le bon de livraison l'étendue des dommages.

Au déballage vérifier :

- à ce que le matériel soit dans un état impeccable, sans coups ni rayures.
- à ce que toutes les fonctionnalités soient en état de marche.
- qu'en cas de problème, vous devez le signaler au transporteur et notifier sur le bon de livraison l'étendue des dommages.

ATTENTION : Toute inscription sur le bon de livraison «*sous réserve de vérification*» (ou autre dans le même style) n'a aucune valeur juridique.

Seul un constat écrit lors de la réception du matériel a valeur.

Lors du stockage magasin ou entrepôt, le matériel doit toujours rester dans son carton d'origine, à l'abri de la pluie et des intempéries. Lorsque le matériel n'est plus utilisé, le stocker dans un endroit à l'abri du passage et des mouvements des machines se trouvant dans la salle.

Conseils de sécurité

Veuillez prendre les précautions suivantes :

Lire les instructions suivantes avant d'utiliser le brancard.

Chaque détail est une importante précaution de sécurité qu'il convient de respecter.



DANGER : un usage inapproprié entraînerait un risque de blessure grave.



ATTENTION : un usage inapproprié entraînerait un risque pour le matériel.



DANGER : ne pas laisser les mains dans les systèmes mécaniques(croisillons, têtère, coulisse de barrière).



DANGER : risque de chute.

Conseils de sécurité (suite)

POIDS maximum autorisé en charge : 180 Kg.



DANGER : ne jamais déplacer le brancard tant que le patient n'est pas correctement installé



DANGER : ne jamais sauter sur le brancard.



DANGER : ne jamais monter à deux.



DANGER : ne jamais installer le patient en bout de matelas.

Avant et pendant chaque utilisation du matériel, le praticien doit s'assurer :



- du parfait état de fonctionnement.



- que le patient ne risque pas de tomber du brancard.

Recommandations



- Ne pas tenter de désassembler ou modifier le matériel.



- Ne pas utiliser un matériel présentant un dysfonctionnement.

Dysfonctionnement possible :

- Une ou plusieurs roues dégradées.
- Un frein ne fonctionne plus.
- le verin hydraulique ne fonctionne plus.

Abréviations et symboles

kg	Kilogramme
cm	Centimètre
mm	Millimètre
° C	Degré celsius
%	Pourcentage

Responsabilité du fabricant

La société VARAY LABORIX se décharge de toute responsabilité en cas de non respect des consignes de sécurité énoncées dans ce manuel ou en cas de mauvaise utilisation.

La responsabilité repose uniquement sur la personne faisant l'examen, nous vous rappelons que tout usage de ce brancard doit être utilisé par du personnel qualifié et sous l'entière responsabilité du médecin.

Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur est tenu :

- de s'assurer que le produit est employé exclusivement aux fins auxquelles il est destiné, à savoir le transfert des patient en milieu IRM.
- de vérifier que toutes les conditions de sécurité soient respectées conformément aux instructions du présent manuel.
- de toujours laisser ce manuel à portée de main de l'utilisateur.


Utilisation du matériel

Reglage en hauteur du couchage

Monter le couchage :

Pour monter le brancard, excercer avec le pied une pression sur la pedale vers le bas jusqu'en butée mécanique : le chariot monte d'environ 100 mm.

Répéter l'opération pour obtenir la position souhaitée

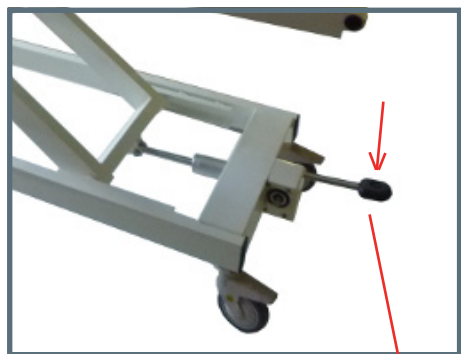



Pédale



Descendre le couchage :

Pour descendre le brancard, il s'agit d'exercer avec le pied une pression vers le haut et de maintenir la position. le couchage descend de manière contrôlée tant que l'on maintient vers le haut la pédale.

Remarque importante : quand le chariot est à vide, il peut arriver que le verin bloque en position et ne redescende pas (notamment en position haute maximum). Si c'est le cas il convient d'exercer une pression sur le couchage tout en maintenant la pédale vers le haut.

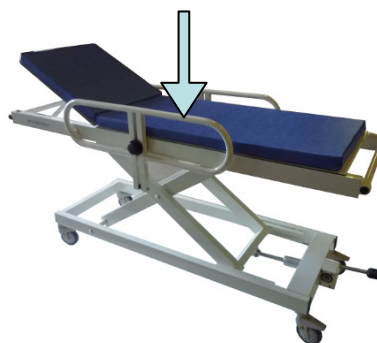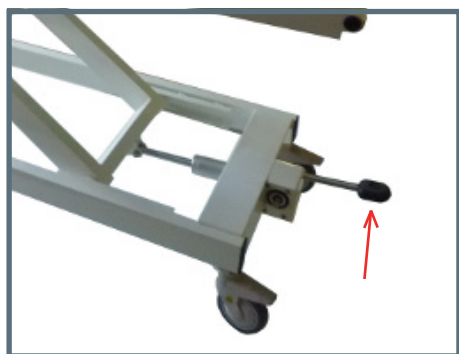

Utilisation des barrières



Dévisser le bouton pour libérer la barrière puis ajuster à la hauteur souhaitée.

Revisser ensuite le bouton pour garder le réglage.



Tête réglable en inclinaison manuellement



4 roulettes à freinage individuel

Conseils d'entretien et de désinfection

Eviter tout produit oxydant à base de dérivés chlorés tel que l'eau de javel et les dérivés oxygénés tel que l'acide péracétique. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de solution de nettoyage entre deux pièces.

La fréquence des nettoyages ainsi que le choix du produit dépendent uniquement du protocole et des instructions de l'utilisateur.

Nous vous conseillons un nettoyage avec une solution en spray suivi d'un essuyage avec une lingette désinfectante. Toute solution de nettoyage sera essuyé avec soin. Eviter le nettoyage à l'eau.

Maintenance et service

Afin d'assurer une efficacité permanente, nous vous conseillons une inspection régulière.

- Inspection journalière visuelle du vérin hydraulique
- Inspection annuelle du matériel, roues, freins, stabilité de l'ensemble.

Notre service technique est en permanence à votre disposition pour vous fournir tous renseignements complémentaires. Contact en fin du manuel.

En cas de panne ou de détérioration, nous vous conseillons de les remplacer par des pièces d'origine.

Liste des pièces disponibles :

- 1-369-001 : Roue amagnétique à frein
- 1-369-002 : Vérin amagnétique hydraulique
- 1-369-003 : Matelas amovible
- 1-369-004 : Ensemble barrière
- 1-369-005 : Vis de serrage barrière

En cas de commande de pièces détachées, vous adresser au fournisseur chez lequel a été acheté le matériel.



* En cas de remplacement d'une marche ou de la passerelle, celles-ci doivent obligatoirement être changées par une personne de la société VARAY LABORIX ou par une personne qu'elle aura désigné, dans le cas contraire VARAY LABORIX se décharge de toutes responsabilités.

Compatibilité

La brancard amagnétique 1-369 est compatible pour un IRM de maximum 3 Tesla.

Caractéristiques

Bâti :

- | | |
|---|--------------|
| - Matière | Aluminium |
| - Hauteur variable hydraulique (pédale) | 680 à 960 mm |
| - Longueur hors tout | 2100 mm |
| - Longueur hors tout | 730 mm |

Tête :

- | | |
|---------------|----------|
| - Réglage | Manuel |
| - Inclinaison | 0 à 75 ° |

Roues :

- | | |
|-----------|---|
| - Matière | Montant en plastique
Roulettes à bandage polyuréthane. |
|-----------|---|

Poids :

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Poids à vide | 73 kg |
| - Poids maximum autorisé | 180 kg |

Couleur :

- | | |
|------------|----------|
| - Bâti | RAL 9002 |
| - Sellerie | Bleu |

Stockage :

- | | |
|------------------|---------------------|
| - Volume | 1.2 m ³ |
| - Surface au sol | 1.47 m ² |
| - Température | +5° C à +30° C |
| - Humidité | 10% à 90% |

Identification :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Classification CE 93/42/CEE | Classe I |
| - Type d'installation | Équipement mobile |



Garantie

Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à dater de la mise en circulation sur le site d'imagerie médicale.

Dans le cadre de cette garantie, les obligations de la société SNVL se limitent à la réparation ou au remplacement du produit ou des pièces détachées qui se révéleraient défectueuses, sous réserve que le produit ait été correctement installé et utilisé conformément au MANUEL UTILISATEUR. SNVL se réserve le droit de procéder à une inspection, si cela s'avérait nécessaire, pour établir la cause du défaut. La garantie concerne le remplacement des pièces et la main d'oeuvre correspondante, qui ne seront pas facturés.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dommages et pertes résultant d'une catastrophe naturelle telle que incendie, tremblement de terre, inondations, foudre, orage, etc...
- Dommages et pertes résultant d'un usage déraisonnable ou erroné, d'un abus, d'une négligence ou d'un entretien inadéquat du matériel.
- Dommages et pertes résultant d'une réparation défectueuse ou d'une modification du matériel par une personne extérieure à la société SNVL VARAY LABORIX

Pour bénéficier du service lié à cette garantie, vous devez nous faire parvenir un courrier recommandé décrivant le problème rencontré, ou contacter votre fournisseur.

En aucun cas vous ne pouvez renvoyer le matériel sans l'accord express de la société SNVL VARAY LABORIX.

À la réception de votre plainte, SNVL VARAY LABORIX pourra choisir, soit de faire réparer le matériel sur site, soit d'organiser un retour atelier.

Cette garantie n'est pas transférable, elle n'est valable que sur le site d'origine et à une seule adresse.

Cette garantie écrite est la seule émise par SNVL VARAY LABORIX. La réparation ou le remplacement fourni par cette garantie sont les seuls dispositifs proposés aux acheteurs.



**23 BIS BD DE LA REPUBLIQUE
18023 BOURGES CEDEX
TÉL 02 48 66 64 80**

«Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis et de ce fait les photographies dans ce manuel ne sont pas contractuelles.»

Ces informations vous seront demandées pour un service rapide :

Date d'achat :	Nom du fournisseur :	N° de série :
	VARAY LABORIX 23bis Bd de la République 18023 BOURGES CEDEX FRANCE	